

Použití:

Respirátor je osobní ochranný prostředek používaný k ochraně dýchacích cest před škodlivými účinky znečištění ovzduší ve formě pevných a / nebo kapalných aerosolů (prach, kouř a mlha). Nechrání před nebezpečnými výpary ani plyny

Kontrola před použitím:

Před každým použitím zkontrolujte, zda je respirátor bez viditelných mechanických poškození, zda není znečištěn a zda není překročeno datum trvanlivosti.

Způsob užívání:

1. Před nasazením respirátoru si umyjte ruce mýdlem a vodou, nebo dezinfekčním přípravkem na bázi alkoholu.
2. Vytáhněte respirátor z obalu a rozložte jeho okraje. Narovnejte špičku tak aby, se celý respirátor rozložil.
3. Založte gumičky kolem uší.
4. Upravte respirátor, aby zakrýval celý obličej.
5. Po upravení respirátoru přitiskněte ruce k nosní přepážce a respirátor si přitlačte k nosu. Stiskněte povrch respirátoru, aby lépe přilnul k obličejí.
6. Zkontrolujte, jestli respirátor těsně zakrývá obličej. To učiníte tak, že rukama zakryjete respirátor a postupně rychle vydechnete vzduch (metoda kontroly přetlaku - respirátor by měl být lehce vypouklý), nebo vdechnete vzduch kontroly podtlaku - respirátor by měl být lehce zapadlý. Pokud pocítíte únik vzduchu u hřbetu nosu, upravte klip respirátoru.



Poznámka: Respirátor musí být po každé směně vyměněn.